



## Zastosowanie i użytkowanie



Należy wybrać opatrunek odpowiedni dla wielkości oparzenia. Otworzyć opakowanie foliowe i wyjąć opatrunek.



Rozwinąć opatrunek i bezzwłocznie nałożyć na powierzchnię oparzenia, a następnie wylać pozostałą w opakowaniu część żelu na opatrunek oraz zanieczyszczenia bądź elementy odzieży przylegające do rany oparzeniowej.



Należy pozostawić opatrunek w miejscu oparzenia. Po nałożeniu na oparzenie opatrunek Water-Jel nie wymaga żadnych dodatkowych działań.  
**NIE DODAWAĆ WODY.**



W razie konieczności skorzystać z pomocy medycznej w możliwie najkrótszym czasie po nałożeniu opatrunku Water-Jel. Przy zdejmowaniu opatrunków Water-Jel należy stosować standardowe procedury przemywania ran i usuwania opatrunków.

### UWAGI I OSTRZEŻENIA

- Oparzenia chemiczne należy przed nałożeniem opatrunku Water-Jel dokładnie opłukać odpowiednim środkiem stanowiącym antidotum dla substancji wywołującej oparzenie i/lub wodą.

**NIE NALEŻY STOSOWAĆ W PRZYPADKU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH WCHODZĄCYCH W REAKCJĘ Z WODĄ**

- Nie stosować u pacjentów stykających się z urządzeniami elektrycznymi będącymi pod napięciem.
- Nie stosować opatrunku jeżeli jego opakowanie było otwarte lub uszkodzone!

### PRZECHOWYWANIE

Wyroby Water-Jel nie wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych; w miarę możliwości należy je przechowywać w pozycji poziomej.



WaterJel Technologies LLC  
Carlstadt, NJ 07072 USA



WaterJel Europe LLP  
Hertford SG13 7BJ UK  
www.waterjel.net